

Gebruiksaanwijzing Posey pols- en enkelbanden: 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2835, 2836



Indicatie: Bewoners/patiënten die zeer onrustig of agressief zijn voor zichzelf of anderen. De banden kunnen met leren riemen of met een band met slot aan stoel of bed worden vastgemaakt
Contra-indicatie: Niet gebruiken bij fractures of wonden, let op bij zeer smalle handen dat de patiënt/bewoner er niet gemakkelijk uit kan schuiven.




2206/2207

• **2204, 2205, 2206, 2207**

Leg de pols- en enkelbanden met doorverbinding op het bed ter hoogte van de polsen en de enkels. Haal de rechter zijband om de bedrand heen, voer de band door de gesp en zet hem vast. Doe hetzelfde met de linker zijband.

Het systeem moet nu strak op het bed liggen. Leg de patiënt op bed en bevestig de band rond pols of enkel waarbij er op gelet moet worden dat de band goed aansluit. Duw het ijzeren oog door een gat in de leren band en verzegel deze door de leren riem er door te steken. Controleer of de pols of enkel niet uit de band getrokken kan worden.

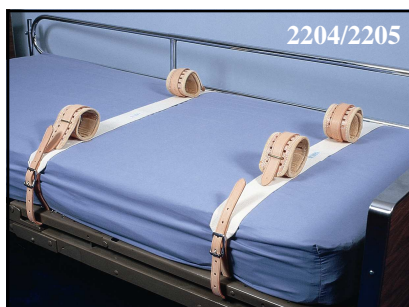

2204/2205

• De **2209, 2210, 2212, 2213** hebben een andere sluiting.

Volg de procedure hierboven en sluit de band rond pols- of enkel door het gat over de pen te drukken tot het slot sluit.

Zorg er voor dat geen lichaamsdelen bekneld kunnen raken bij verstellen van het bed.

• **2202 en 2203**

Bevestig de band rond pols of enkel waarbij er op gelet moet worden dat deze goed aansluit. Duw het ijzeren oog door een gat in de leren band en verzegel hem door de leren riem er door te steken.

Controleer of de pols of enkel niet uit de band getrokken kan worden. De pols- of enkelband kan met een leren riem of band met slot aan bed of stoel worden vastgemaakt.

• **2208 en 2211**


hebben een andere sluiting hier drukt men het gat over de pen en sluit het slot.

• **2835 en 2836.**

Bevestig de band rond pols of enkel en voer het uiteinde van de band door het geopende slot. Sluit de band goed aan en klik het slot dicht. De 2835 werkt met een sleutel terwijl bij de 2836 een pin moet worden ingedrukt en aan een knop moet worden gedraaid om het slot te openen. De banden kunnen met leren riemen of met een band met slot aan stoel of bed worden vastgemaakt.



2202/2203

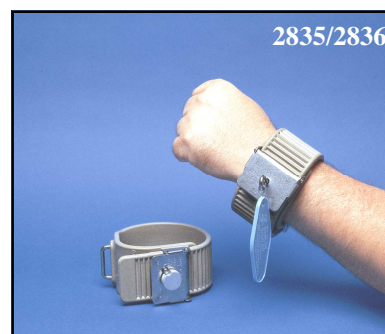

2835/2836

Monitor de patiënt regelmatig en let op comfort en veiligheid. Doe de beddekken omhoog met beddekbeschermers en zet het bed in de laagste stand. Zorg er voor dat geen lichaamsdelen bekneld kunnen raken bij verstellen van het bed. Volg het fixatie protocol van uw instelling. Zie verder de veiligheidsinstructies: z.o.z. Zorg ervoor dat er altijd een veiligheidsmes in de buurt is om de banden door te snijden in paniek situaties!



Veiligheidsinstructies

- #1 Volg altijd de richtlijnen van ziekenhuis of instelling bij het gebruik van Posey en It-Fits producten. Posey en It-Fits producten alleen na advies van een bevoegd arts toepassen. Patiënten met een vrijheidsbeperking moeten regelmatig gecontroleerd worden op veiligheid en comfort.
- #2 Gebruik de Posey en It-Fits veiligheidsbeperkende producten nooit als veiligheidsgordels in rijdende voertuigen. Gebruik de Posey en It-Fits producten ook niet om rolstoelen in rijdende voertuigen vast te zetten.
- #3 Posey en It-Fits producten niet blootstellen aan vuur of aan brandende en smeulende materialen. Brandvertragende producten zijn op aanvraag leverbaar.
- #4 Controleer of de patiënt niet uit de (rol)stoel kan glijden of van het bed kan vallen of over, tussen of onder het bedhek kan geraken, waardoor de patiënt als gevolg daarvan letsel kan oplopen of zelfs kan overlijden. De banden moeten goed vastzitten, maar mogen de vrije ademhaling niet belemmeren. Controleer bij het gebruik van snelclicks de bevestiging, zodat deze niet kunnen schuiven en de patiënt uit bed zou kunnen komen te hangen.
- #5 **WAARSCHUWING!** Kies de juiste maat van het product en controleer de patiënt regelmatig op comfort en veiligheid. Controleer de huidconditie met regelmaat. Volg de protocollen over vrijheidsbeperking van uw instelling.
- #6 Zet het bed in de laagste stand met de bedhekken omhoog, om te voorkomen dat de patiënt uit bed valt. Doe bedhekbeschermer om de bedhekken. De bevestigingspunten van banden en gordels dienen buiten het bereik van de patiënt aangebracht te worden. Let op dat de patiënt niet knel komt te zitten als het bed versteld wordt. Zorg dat de bevestigingspunten van de banden niet kunnen verschuiven.
- #7 Bevestig de rolstoelbanden aan de achterzijde van de rolstoel in een hoek van 45° om het bekken van de patiënt. Zet de patiënt goed achter in de rolstoel alvorens de band aan te brengen om onderuitglijden te voorkomen. Het gebruik van een zitbroek kan nodig zijn om het wegglijden uit de rolstoel te voorkomen.
- #8 Controleer producten altijd vóór het gebruik op losse steken, losse naden, breuken of doorgesneden materialen. Genoemde mankementen kunnen de goede werking van het product beperken en verwonding van de patiënt tot gevolg hebben. Verwijder en vernietig afgekeurde producten. Banden moeten zo lang zijn dat de bevestiging niet door patiënt losgemaakt kan worden. Verander zelf geen producten.
- #9 Monitor de patiënt/ bewoner regelmatig bij het gebruik van antischeur materialen en let op dat de patiënt/bewoner zichzelf of een ander geen letsel kan toebrengen met behulp van de toegepaste materialen.
- #10 Alvorens kledingstukken te gebruiken, leest u a.u.b. de aangebrachte labels aan de binnenzijde. Voor op maat gemaakte kleding dient een eigen gebruikersprotocol opgesteld te worden. De verzorgenden zijn zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het kledingstuk.
- #11 Neem het kledingstuk op in uw protocol, en denk daarbij aan mogelijke calamiteiten, gedrag van patiënten/ bewoners en eventuele fixatiemiddelen die om of aan het kledingstuk bevestigd worden of zijn. Bij gebruik van vrijheidsbeperkende middelen aan of om het kledingstuk dient u de voorschriften van de BOPZ of de WBG in acht te nemen.
- #12 It-Fits kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het onjuist, of onterecht gebruik van haar producten.
- #13 Zorg ervoor dat er altijd een veiligheidsmes in de buurt is om de banden door te snijden in paniek situaties.

Wasinstructies

- #1 Decubitus vachten en andere produkten vervaardigd uit synthetisch materiaal, zoals de bijvoorbeeld de gepolsterde banden en zitbroeken kunnen normaal gewassen worden op een temperatuur van ca. 60 graden. Niet drogen in droogtrommel! Na droging vachten goed borstelen.
- #2 Foam artikelen, zoals condoomcatheter-bevestigers, polshouders en rolstoelkussens etc. kan men het beste met een niet agressief wasmiddel (zonder bleekmiddel) reinigen op een temperatuur van ca. 45 graden. Niet drogen in droogtrommel!
- #3 Banden met vaste metalen sloten kunnen na het sluiten van de sloten, en eventuele klittenbanden, in een waszak gewassen worden op een temperatuur van ca. 40 graden. Het verdient aanbeveling de sloten van tijd tot tijd te oliën i.v.m. kalkaanslag op het mechanisme. Banden met plastic snelsluitingen zijn wasbaar op een temperatuur van 60 graden. Ter voorkoming van onherstelbare schade aan de sloten mogen banden met vast slot beslist NIET onder persplaten gelegd worden.
- #4 Alle "Double Security" pols- en enkelhouders mogen op ca. 60 graden gewassen worden. Vergeet niet de klittenband te sluiten tegen pluizen en andere vervuiling, waardoor de klittenband niet meer goed aan elkaar hecht.
- #5 Vesten en zit broeken vervaardigd uit Breezeline (polyester) kunnen met een normaal wasmiddel tot ca. 60 graden gewassen worden. Niet drogen in droogtrommel!
- #6 Alle katoenen- of canvas producten, kunnen op ca. 60 graden gewassen worden met een niet agressief wasmiddel en voorts gecentrifugeerd en gedroogd worden.
- #7 Lederen pols-en enkelbanden en riemen kunnen op een temperatuur van 40 graden gewassen worden met natuurlijke zeep. Langzaam laten drogen en niet in de droogtrommel. Na het wassen het leer inwrijven met ledervet of olie.
- #8 Echte schapenwolproducten kunnen in de wasmachine gewassen worden op 30 graden met een wolwasmiddel. Niet centrifugeren en langzaam drogen. Eventueel opborstelen bij klitvorming.
- #9 Dyneema anti- scheurmateriaal bestaat uit 100% polyester en kan gewassen worden op bij voorkeur 30 graden. De materialen kunnen het beste na het wassen uitgehangen worden om te drogen.
- #10 Indien een droogtrommel wordt gebruikt bij Dyneema mag deze beslist niet op meer dan 30 graden drogen. De uiterste was- en droogtemperatuur is 60 graden maar dan zal op den duur een krimp van 8 a 9 % optreden.
- #11 Was de kleding met gesloten ritsen, indien aanwezig. Dit voorkomt extra slijtage. Ritsen niet onder persplaten leggen!
- #12 Klittenbanden moeten gesloten worden gewassen i.v.m. pluizen en andere vervuiling.

Voor de exacte wasinstructies per product kijkt u op de labels van de producten.