

Gebruiksaanwijzing Posey pols en enkelbanden #2750, 2755, 2790 (Q), 2791(Q), 2792, 2793, 2798, 2799 en 2800



Indicatie: Patiënten/bewoners die slangen of infuus uittrekken, automutileren of agressie vertonen. Contra-indicatie: Niet gebruiken bij fracturen of wonden. Let op bij personen met zeer smalle handen; de patiënt/ bewoner zou uit kunnen schuiven.

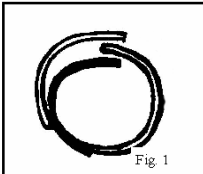


Fig. 1

De pols- en enkelbanden van Posey zijn met een kleur gecodeerd. Blauwe binnenvoering betekent polsband, terwijl de enkelband een rode binnenvoering heeft. De pols- en enkel banden hebben diverse soorten sluitingen met verschillende veiligheidsaspecten.

1. Basissluiting van klittenband (2750 en 2755)

Bevestig de band rond pols of enkel waarbij erop gelet moet worden dat het zachte neopreen als eerste rond de huid wordt aangebracht. Sluit vervolgens de klittenband delen over elkaar. (Fig. 1.)

De bevestiging aan de bedrand geschiedt ook door middel van klittenband. Leg de flapjes over elkaar zodat de band stevig vastzit. (Fig. 2)



Fig. 1

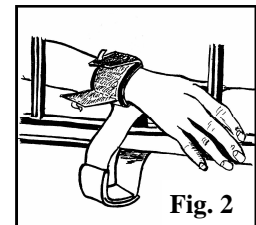


Fig. 2

2. Extra veiligheid door middel van een bandje rond pols of enkel (2790 en 2791) Q = met snelsluit clips.

Sluit de band rond pols of enkel zoals bij 1. Het extra bandje wordt rond de pols of enkel geleid en aan het eind door de twee ringen gevoerd. Vervolgens wordt het bandje weer door één ring teruggestoken. (Fig. 3). De polsband wordt door middel van twee banden aan de voet- en hoofdzijde van het bed vast gemaakt. Dit gebeurt ook weer met het systeem van de twee ringen. (Fig. 4) De enkelband wordt slecht met één band vastgemaakt.



Fig. 3

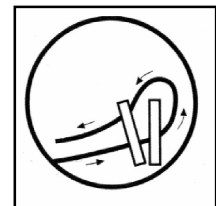


Fig. 4



Fig. 5



3. Extra veiligheid door middel van slot (2792, 2793, 2798, 2799, 2800).

Sluit de band rond pols of enkel zoals bij 1. De 2792 en 2793 hebben een slot aan de bevestigingsband voor het bed (Fig. 5) Haal de band om een bedstang heen en voer deze door het geopende slot. Bepaal de juiste lengte en klik het slot dicht. De 2798 en 2799 hebben nog een extra slot om de pols of enkel (Fig. 6) Hier wordt de extra band rond de pols of enkel aangebracht en vervolgens door het geopende slot geschoven waarna het slot dicht geklikt wordt. De 2800 wordt rond de taille bevestigd met een slot. De 2801 wordt tussen de enkels bevestigd.



Fig. 6



De banden mogen in de wasserij niet onder persplaten gelegd worden. Dit verniet de sloten. **De sloten dienen regelmatig gesmeerd te worden!!!** (met bijv. siliconen-, teflon- of andere spray). Door het wassen spoelt het smeermiddel weg en werkt het slot stroef of weigert!!!

Monitor de patiënt regelmatig en let op comfort en veiligheid. Doe de beddekken omhoog met beddekbeschermers en zet het bed in de laagste stand. Zorg er voor dat geen lichaamsdelen bekneld kunnen raken bij verstellen van het bed. Volg het fixatie protocol van uw instelling. Zie verder de veiligheids instructies: z.o.z. Zorg ervoor dat er altijd een veiligheidsmes in de buurt is om de banden door te snijden in paniek situaties!



Veiligheidsinstructies

- #1 Volg altijd de richtlijnen van ziekenhuis of instelling bij het gebruik van Posey en It-Fits producten. Posey en It-Fits producten alleen na advies van een bevoegd arts toepassen. Patiënten met een vrijheidsbeperking moeten regelmatig gecontroleerd worden op veiligheid en comfort.
- #2 Gebruik de Posey en It-Fits veiligheidsbeperkende producten nooit als veiligheidsgordels in rijdende voertuigen. Gebruik de Posey en It-Fits producten ook niet om rolstoelen in rijdende voertuigen vast te zetten.
- #3 Posey en It-Fits producten niet blootstellen aan vuur of aan brandende en smeulende materialen. Brandvertragende producten zijn op aanvraag leverbaar.
- #4 Controleer of de patiënt niet uit de (rol)stoel kan glijden of van het bed kan vallen of over, tussen of onder het bedhek kan geraken, waardoor de patiënt als gevolg daarvan letsel kan oplopen of zelfs kan overlijden. De banden moeten goed vastzitten, maar mogen de vrije ademhaling niet belemmeren. Controleer bij het gebruik van snelclicks de bevestiging, zodat deze niet kunnen schuiven en de patiënt uit bed zou kunnen komen te hangen.
- #5 **WAARSCHUWING!** Kies de juiste maat van het product en controleer de patiënt regelmatig op comfort en veiligheid. Controleer de huidconditie met regelmaat. Volg de protocollen over vrijheidsbeperking van uw instelling.
- #6 Zet het bed in de laagste stand met de bedhekken omhoog, om te voorkomen dat de patiënt uit bed valt. Doe bedhekbeschermer om de bedhekken. De bevestigingspunten van banden en gordels dienen buiten het bereik van de patiënt aangebracht te worden. Let op dat de patiënt niet knel komt te zitten als het bed versteld wordt. Zorg dat de bevestigingspunten van de banden niet kunnen verschuiven.
- #7 Bevestig de rolstoelbanden aan de achterzijde van de rolstoel in een hoek van 45° om het bekken van de patiënt. Zet de patiënt goed achter in de rolstoel alvorens de band aan te brengen om onderuitglijden te voorkomen. Het gebruik van een zitbroek kan nodig zijn om het wegglijden uit de rolstoel te voorkomen.
- #8 Controleer producten altijd vóór het gebruik op losse steken, losse naden, breuken of doorgesneden materialen. Genoemde mankementen kunnen de goede werking van het product beperken en verwonding van de patiënt tot gevolg hebben. Verwijder en vernietig afgekeurde producten. Banden moeten zo lang zijn dat de bevestiging niet door patiënt losgemaakt kan worden. Verander zelf geen producten.
- #9 Monitor de patiënt/ bewoner regelmatig bij het gebruik van antischeur materialen en let op dat de patiënt/bewoner zichzelf of een ander geen letsel kan toebrengen met behulp van de toegepaste materialen.
- #10 Alvorens kledingstukken te gebruiken, leest u a.u.b. de aangebrachte labels aan de binnenzijde. Voor op maat gemaakte kleding dient een eigen gebruikersprotocol opgesteld te worden. De verzorgenden zijn zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het kledingstuk.
- #11 Neem het kledingstuk op in uw protocol, en denk daarbij aan mogelijke calamiteiten, gedrag van patiënten/ bewoners en eventuele fixatiemiddelen die om of aan het kledingstuk bevestigd worden of zijn. Bij gebruik van vrijheidsbeperkende middelen aan of om het kledingstuk dient u de voorschriften van de BOPZ of de WBG in acht te nemen.
- #12 It-Fits kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het onjuist, of onterecht gebruik van haar producten.
- #13 Zorg ervoor dat er altijd een veiligheidsmes in de buurt is om de banden door te snijden in paniek situaties.

Wasinstructies

- #1 Decubitus vachten en andere produkten vervaardigd uit synthetisch materiaal, zoals de bijvoorbeeld de gepolsterde banden en zitbroeken kunnen normaal gewassen worden op een temperatuur van ca. 60 graden. Niet drogen in droogtrommel! Na droging vachten goed borstelen.
- #2 Foam artikelen, zoals condoomcatheter-bevestigers, polshouders en rolstoelkussens etc. kan men het beste met een niet agressief wasmiddel (zonder bleekmiddel) reinigen op een temperatuur van ca. 45 graden. Niet drogen in droogtrommel!
- #3 Banden met vaste metalen sloten kunnen na het sluiten van de sloten, en eventuele klittenbanden, in een waszak gewassen worden op een temperatuur van ca. 40 graden. Het verdient aanbeveling de sloten van tijd tot tijd te oliën i.v.m. kalkaanslag op het mechanisme. Banden met plastic snelsluitingen zijn wasbaar op een temperatuur van 60 graden. Ter voorkoming van onherstelbare schade aan de sloten mogen banden met vast slot beslist NIET onder persplaten gelegd worden.
- #4 Alle "Double Security" pols- en enkelhouders mogen op ca. 60 graden gewassen worden. Vergeet niet de klittenband te sluiten tegen pluizen en andere vervuiling, waardoor de klittenband niet meer goed aan elkaar hecht.
- #5 Vesten en zit broeken vervaardigd uit Breezeline (polyester) kunnen met een normaal wasmiddel tot ca. 60 graden gewassen worden. Niet drogen in droogtrommel!
- #6 Alle katoenen- of canvas producten, kunnen op ca. 60 graden gewassen worden met een niet agressief wasmiddel en voorts gecentrifugeerd en gedroogd worden.
- #7 Lederen pols-en enkelbanden en riemen kunnen op een temperatuur van 40 graden gewassen worden met natuurlijke zeep. Langzaam laten drogen en niet in de droogtrommel. Na het wassen het leer inwrijven met ledervet of olie.
- #8 Echte schapenwolproducten kunnen in de wasmachine gewassen worden op 30 graden met een wolwasmiddel. Niet centrifugeren en langzaam drogen. Eventueel opborstelen bij klitvorming.
- #9 Dyneema anti- scheurmateriaal bestaat uit 100% polyester en kan gewassen worden op bij voorkeur 30 graden. De materialen kunnen het beste na het wassen uitgehangen worden om te drogen.
- #10 Indien een droogtrommel wordt gebruikt bij Dyneema mag deze beslist niet op meer dan 30 graden drogen. De uiterste was- en droogtemperatuur is 60 graden maar dan zal op den duur een krimp van 8 a 9 % optreden.
- #11 Was de kleding met gesloten ritsen, indien aanwezig. Dit voorkomt extra slijtage. Ritsen niet onder persplaten leggen!
- #12 Klittenbanden moeten gesloten worden gewassen i.v.m. pluizen en andere vervuiling.

Voor de exacte wasinstructies per product kijkt u op de labels van de producten.