

Gebruiksaanwijzing Posey de luxe hielbeschermer #6147 en Posey de luxe hielbeschermer met loopfunctie #6148



Indicatie: Te gebruiken bij bewoners/ patiënten die beschermd moeten worden tegen decubitus aan de hielen en het bespoedigen van de genezing van decubitus. Deze beschermer zorgt ervoor dat de hiel altijd vrij blijft. Optioneel kan tevens worden voorkomen dat de voet wegdraait t.o.v. de heup. Met art # 6148 heeft de patiënt de mogelijkheid om kleine afstanden te kunnen lopen.

Contra-indicatie: Niet gebruiken als het protocol van uw instelling dit niet toestaat.




6148 Posey hielbeschermer deluxe met teenstuk én loopfunctie (afneembare zool)



Zorg dat de knoppen onder de loopzool goed vastzitten voordat de patiënt gaat lopen. Alleen geschikt voor korte afstanden, het beste binnenshuis. Wassen volgens label; bekleding van het frame afhalen. Er is een speciale waszak verkrijgbaar: art. # 6150

Maat	Ondersteuning kuit	Ondersteuning voet
S/M Small/Medium	33 - 40,5 cm	18 - 25,5 cm
M/L Medium/Large	38 - 45,5 cm	23 - 35,5 cm

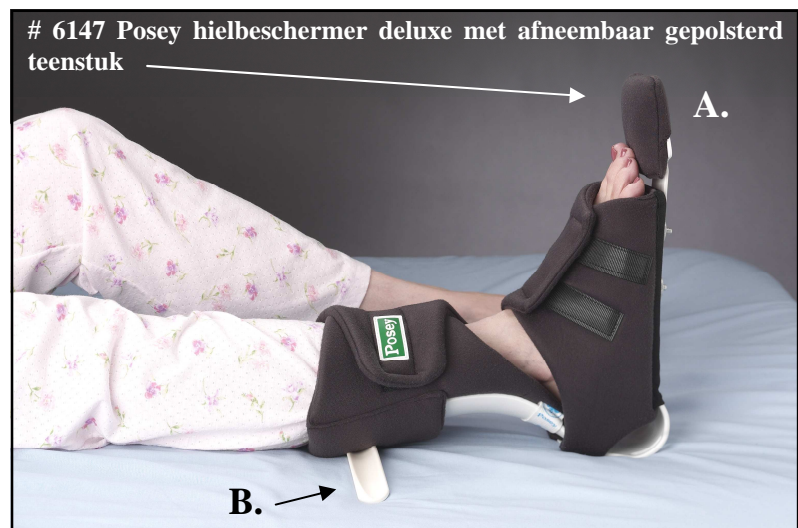

1. Open de klittenband sluitingen.
2. Leg de patiënt op de rug met gebogen knie en de voetzool op het matras, til het onderbeen op en plaats de hielbeschermer onder de voet.
3. Positioneer de voetzool goed tegen de onderkant en de kuit goed tegen de achterkant, maar wel zo dat de hiel geheel vrij van contact met de beschermer komt te zitten (ronde uitsparing bij de hak).
4. Bevestig de sluitingen met de klittenbanden.
5. Zorg ervoor dat er een vinger past tussen de hiel en de houder voor de minimale afstand, zodat de hiel onbelast blijft.

Teenstuk - Houdt de deken op afstand van de tenen (afb. A.):

1. Draai de knoppen aan de onderkant van de beschermer los.
2. Schuif de gleuf van het witte teenstuk hieronder en draai de knoppen weer vast. Schuif het tenenkussentje over de punt.

Stabilisatiestaaf - helpt wegdraaien van de voet tegenaan (afb. B.):

1. Draai de knop achter de staaf los en draai de staaf in de juiste positie.
2. Draai de knop weer vast.

Zool voor loopfunctie - alleen bij # 6148 S/M en M/L (afb. C.)

1. Draai de knoppen aan de onderkant van de beschermer los.
2. Indien aanwezig; haal het witte teenstuk weg. Plaats de zool over de knoppen, druk aan en schuif deze omhoog totdat de knoppen recht in het midden onder de zool komen te zitten. Draai de knoppen weer goed vast en schuif het tenenkussentje over de punt.

Monitor de patiënt regelmatig en let op comfort en veiligheid. Volg het fixatie protocol van uw instelling. Zie verder de veiligheids instructies: z.o.z. Posey adviseert de hielbeschermers tenminste iedere 2 uur te controleren op bewegingsvrijheid, toestand van de huid en bloedcirculatie.



Veiligheidsinstructies

- #1 Volg altijd de richtlijnen van ziekenhuis of instelling bij het gebruik van Posey en It-Fits producten. Posey en It-Fits producten alleen na advies van een bevoegd arts toepassen. Patiënten met een vrijheidsbeperking moeten regelmatig gecontroleerd worden op veiligheid en comfort.
- #2 Gebruik de Posey en It-Fits veiligheidsbeperkende producten nooit als veiligheidsgordels in rijdende voertuigen. Gebruik de Posey en It-Fits producten ook niet om rolstoelen in rijdende voertuigen vast te zetten.
- #3 Posey en It-Fits producten niet blootstellen aan vuur of aan brandende en smeulende materialen. Brandvertragende producten zijn op aanvraag leverbaar.
- #4 Controleer of de patiënt niet uit de (rol)stoel kan glijden of van het bed kan vallen of over, tussen of onder het bedhek kan geraken, waardoor de patiënt als gevolg daarvan letsel kan oplopen of zelfs kan overlijden. De banden moeten goed vastzitten, maar mogen de vrije ademhaling niet belemmeren. Controleer bij het gebruik van snelclicks de bevestiging, zodat deze niet kunnen schuiven en de patiënt uit bed zou kunnen komen te hangen.
- #5 **WAARSCHUWING!** Kies de juiste maat van het product en controleer de patiënt regelmatig op comfort en veiligheid. Controleer de huidconditie met regelmaat. Volg de protocollen over vrijheidsbeperking van uw instelling.
- #6 Zet het bed in de laagste stand met de bedhekken omhoog, om te voorkomen dat de patiënt uit bed valt. Doe bedhekbeschermer om de bedhekken. De bevestigingspunten van banden en gordels dienen buiten het bereik van de patiënt aangebracht te worden. Let op dat de patiënt niet knel komt te zitten als het bed versteld wordt. Zorg dat de bevestigingspunten van de banden niet kunnen verschuiven.
- #7 Bevestig de rolstoelbanden aan de achterzijde van de rolstoel in een hoek van 45° om het bekken van de patiënt. Zet de patiënt goed achter in de rolstoel alvorens de band aan te brengen om onderuitglijden te voorkomen. Het gebruik van een zitbroek kan nodig zijn om het wegglijden uit de rolstoel te voorkomen.
- #8 Controleer producten altijd vóór het gebruik op losse steken, losse naden, breuken of doorgesneden materialen. Genoemde mankementen kunnen de goede werking van het product beperken en verwonding van de patiënt tot gevolg hebben. Verwijder en vernietig afgekeurde producten. Banden moeten zo lang zijn dat de bevestiging niet door patiënt losgemaakt kan worden. Verander zelf geen producten.
- #9 Monitor de patiënt/ bewoner regelmatig bij het gebruik van antischeur materialen en let op dat de patiënt/bewoner zichzelf of een ander geen letsel kan toebrengen met behulp van de toegepaste materialen.
- #10 Alvorens kledingstukken te gebruiken, leest u a.u.b. de aangebrachte labels aan de binnenzijde. Voor op maat gemaakte kleding dient een eigen gebruikersprotocol opgesteld te worden. De verzorgende zijn zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het kledingstuk.
- #11 Neem het kledingstuk op in uw protocol, en denk daarbij aan mogelijke calamiteiten, gedrag van patiënten/ bewoners en eventuele fixatiemiddelen die om of aan het kledingstuk bevestigd worden of zijn. Bij gebruik van vrijheidsbeperkende middelen aan of om het kledingstuk dient u de voorschriften van de BOPZ of de WBG in acht te nemen.
- #12 It-Fits kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het onjuist, of onterecht gebruik van haar producten.
- #13 Zorg ervoor dat er altijd een veiligheidsmes in de buurt is om de banden door te snijden in paniek situaties.

Wasinstructies

- #1 Decubitus vachten en andere produkten vervaardigd uit synthetisch materiaal, zoals de bijvoorbeeld de gepolsterde banden en zitbroeken kunnen normaal gewassen worden op een temperatuur van ca. 60 graden. Niet drogen in droogtrommel! Na droging vachten goed borstelen.
- #2 Foam artikelen, zoals condoomcatheter-bevestigers, polshouders en rolstoelkussens etc. kan men het beste met een niet agressief wasmiddel (zonder bleekmiddel) reinigen op een temperatuur van ca. 45 graden. Niet drogen in droogtrommel!
- #3 Banden met vaste metalen sloten kunnen na het sluiten van de sloten, en eventuele klittenbanden, in een waszak gewassen worden op een temperatuur van ca. 40 graden. Het verdient aanbeveling de sloten van tijd tot tijd te oliën i.v.m. kalkaanslag op het mechanisme. Banden met plastic snelsluitingen zijn wasbaar op een temperatuur van 60 graden. Ter voorkoming van onherstelbare schade aan de sloten mogen banden met vast slot beslist NIET onder persplaten gelegd worden.
- #4 Alle "Double Security" pols- en enkelhouders mogen op ca. 60 graden gewassen worden. Vergeet niet de klittenband te sluiten tegen pluizen en andere vervuiling, waardoor de klittenband niet meer goed aan elkaar hecht.
- #5 Vesten en zit broeken vervaardigd uit Breezeline (polyester) kunnen met een normaal wasmiddel tot ca. 60 graden gewassen worden. Niet drogen in droogtrommel!
- #6 Alle katoenen- of canvas producten, kunnen op ca. 60 graden gewassen worden met een niet agressief wasmiddel en voorts gecentrifugeerd en gedroogd worden.
- #7 Lederen pols-en enkelbanden en riemen kunnen op een temperatuur van 40 graden gewassen worden met natuurlijke zeep. Langzaam laten drogen en niet in de droogtrommel. Na het wassen het leer inwrijven met ledervet of olie.
- #8 Echte schapenwolproducten kunnen in de wasmachine gewassen worden op 30 graden met een wolwasmiddel. Niet centrifugeren en langzaam drogen. Eventueel opborstelen bij klitvorming.
- #9 Dyneema anti- scheurmateriaal bestaat uit 100% polyester en kan gewassen worden op bij voorkeur 30 graden. De materialen kunnen het beste na het wassen uitgehangen worden om te drogen.
- #10 Indien een droogtrommel wordt gebruikt bij Dyneema mag deze beslist niet op meer dan 30 graden drogen. De uiterste was- en droogtemperatuur is 60 graden maar dan zal op den duur een krimp van 8 a 9 % optreden.
- #11 Was de kleding met gesloten ritsen, indien aanwezig. Dit voorkomt extra slijtage. Ritsen niet onder persplaten leggen!
- #12 Klittenbanden moeten gesloten worden gewassen i.v.m. pluizen en andere vervuiling.

Voor de exacte wasinstructies per product kijkt u op de labels van de producten.