


Salvafix®



Español - Català - Euskera - Galego - English - Français - Deutsch - Italiano
Nederlands - Português - Polski - Lietuvos - РУССКИЙ - 日本語 - 中文 - العربية

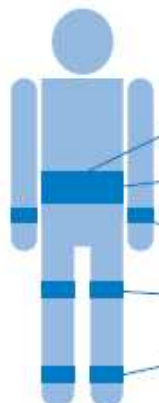

SIZE	MIN.(cm)	MAX.(cm)	Width(cm)
S	46	76	16
M	68	108	18
L	95	135	18
XL	115	150	18
M	68	108	8
L	74	114	8
S	10	15	8
M	15	20	8
L	20	25	8
XL	25	30	8
M	32	62	8
S	13	18	8
M	18	24	8
L	24	28	8
XL	28	34	8

**MEDICARE
SYSTEM**

Abat Escarré, 15 1ª planta
08302 Mataró/Barcelona (Spain)
info@medisystems1.com
www.medisystems1.com



NEDERLANDS

TOEPASSINGSAANWIJZING:

Zie de pictogrammen in deze folder.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN:

1. Gebruik het product dat geschikt is voor de lengte en gewicht van de patiënt (zie maattabel).
2. Controleer het GEHELE systeem VÓÓR GEBRUIK.
3. ALLE Salvafix banden dienen stevig aan de vaste delen van het bedframe vastgemaakt te worden.
4. Gebruik **ALTIJD** de twee zijbanden van de Salvafix gordel.
5. De TWEE bedhekken dienen altijd **OMHOOGGETRÖKKEN** en **GEBLOKKEERD** te zijn. **B**
6. De bedhekken dienen uit één stuk te bestaan.
7. Patiënten die met Salvafix onrustbanden zijn vastgebonden dienen constant in de gaten gehouden te worden. **C**
8. Volg de instructies van het protocol inzake vrijheidsbeperkende maatregelen dat in uw instelling wordt toegepast.
9. Gebruik de Salvafix banden **NOOIT** indien u niet over een gedegen opleiding en werkervaring beschikt.
10. Gebruik de Salvafix banden **NOOIT** voordat u ALLE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN op de afdeling VEILIGHEID van www.medisystems1.com goed heeft doorgelezen.
11. In noodsituaties dient u altijd over een snij-element te beschikken dat snel en veilig in gebruik is. **D**
12. Bij patiënten met pacemakers mag u de magnetische sleutel **NOOIT** op minder dan 15 cm houden.

OPGELET:

Gebruik de Salvafix producten **NOOIT** indien niet aan AL deze voorwaarden wordt voldaan.

Een onjuist gebruik van de Salvafix fixatiemiddelen kan bij de patiënt ernstige letsels en zelfs de dood veroorzaken door verwuring of verstikking. **A**

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

- SALVAFIX producten zijn niet brandwerend.
- Vóór het wassen van de SALVAFIX fixatiemiddelen dienen alle SALVAFIX vergrendelknoppen en verankeringspennen verwijderd te worden.
- SALVAFIX producten zijn vervaardigd uit 100% polyester en kunnen op hoge temperaturen (90°) gewassen worden.
- De Velcro® haakband kan vol raken met stof en pluisjes en dient regelmatig met een harde borstel gereinigd te worden.

